

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KÍNH CHỐNG TIA X “JI SHENG”

1. Sản phẩm được sử dụng như là thiết bị bảo vệ bức xạ tia X cho đôi mắt của người mang
2. Sản phẩm không được dự định để dùng cho việc bảo vệ chống bắn chất lỏng, hoặc các nguy cơ tác động khác.
3. Nhẹ nhàng rửa sạch các sản phẩm bằng nước sạch và xà phòng nhẹ và sau đó lau khô bằng vải mềm để tránh trầy xước mặt kính.
4. Lưu trữ các sản phẩm trong các hộp cứng khi không sử dụng. Giữ ở nơi thoáng mát và khô ráo.
5. Không đặt mặt kính úp mặt xuống trên bất kỳ bề mặt nào vì sản phẩm có thể dễ dàng bị trầy xước.
6. Kiểm tra các sản phẩm thường xuyên. nếu các mặt kính trở nên đục, biến dạng, mẻ hoặc các hư hại khác, hãy ngừng sử dụng ngay lập tức. Mặt kính bị hư hỏng có thể không còn đủ khả năng bảo vệ hoặc có thể gây chấn thương. Liên hệ với đại diện công ty của chúng tôi nếu cần thêm sự hỗ trợ.
7. Không cố gắng để tháo gỡ hoặc sửa chữa sản phẩm. Không có linh kiện thay thế.
8. Không khử trùng sản phẩm. Các sản phẩm có thể bị hư hỏng do nhiệt độ cao hoặc áp lực
9. Sử dụng cả hai tay để đeo và gỡ sản phẩm ra để phòng ngừa các khung nhựa bị lệch, biến dạng hay bị gãy.
10. Đối với các sản phẩm có chứa chì, khi xử lý, xin vui lòng tuân thủ pháp luật và các quy định tại địa phương của bạn.

