

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ÁO CHÌ CHỐNG TIA X “JI SHENG”

1. Đảm bảo người mặc đúng kích cỡ và thiết kế trong môi trường làm việc và các vị trí quan trọng được che chắn đầy đủ.
2. Sản phẩm nên được treo một cách an toàn trên giá đỡ chuyên dụng hoặc móc treo lên khi không sử dụng.
3. Không gấp, chùng hoặc ngồi đè lên sản phẩm. Đặc biệt sản phẩm cần được giữ tránh những vật sắc nhọn.
4. Không phơi sản phẩm với nhiệt độ cực nóng hoặc cực lạnh hoặc trực tiếp ánh sáng mặt trời.
5. Nếu bề mặt vải bị dơ bẩn, lau sạch cẩn thận bằng vải mềm với nước để làm ẩm và sau đó lau khô càng sớm càng tốt. Không ngâm hoặc nhấn chìm trong nước.
6. Miếng dán cố định áo nên được ép một cách chính xác với nhau. nếu sử dụng không đúng cách, vải có thể bị hư hỏng bởi các miếng dán đó.
7. Không sử dụng hóa chất mạnh và không bao giờ dùng máy rửa sản phẩm.
8. Khuyến khích kiểm tra khiếm khuyết của sản phẩm khi nhận được và kiểm tra đều đặn sau đó bằng chất huỳnh quang để đảm bảo không có thiệt hại xảy ra với các vật liệu cốt lõi.
9. Chúng tôi cung cấp 2 loại sản phẩm có chứa chì và không chứa chì. Đối với sản phẩm có chứa chì, khi thải bỏ, xin vui lòng thực hiện theo pháp luật địa phương và quy định chung.

