





TIO MEDICAL PRODUCTS INDUSTRY AND TRADE LTD. CO.	HƯỚNG DẪN SỬ	Số tài liệu :	TA 18
	DỤNG BỘ CÔNG	Ngày :	24.12.2015
	CỤ PHẪU	Số hiệu chỉnh :	00
	THUẬT	Trang :	1/1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ CẢNH BÁO:

1. Không sử dụng các sản phẩm bị rách và có bao bì bị hỏng.
2. Trong khi tháo sản phẩm khỏi bao bì, tháo cẩn thận từ nơi "mở ở đây".
3. Chú ý không làm hại đến gói thứ hai của sản phẩm.
4. Giữ sản phẩm ở những nơi mát và khô.
5. Các sản phẩm được khử trùng.
6. Gói các bộ sản phẩm nên được đóng lại.
7. Các sản phẩm bên trong của bộ phải được đóng gói theo thứ tự sử dụng.
8. Khi xé sản phẩm, giữ ở nơi thoáng đãng.
9. Hãy cẩn thận với các stitches trên splices của vải.
10. Không mở gói theo hướng ngược lại.
11. Chú ý đến các dấu hiệu mũi tên và các nhãn hướng trong khi lan rộng màng treo lên bệnh nhân.
12. Các dải da trên vải phải được mở theo hướng mũi tên.
13. Dải da chống dị ứng. Chú ý rằng các dải da cũng bị mắc kẹt với cơ thể bệnh nhân.

KÝ HIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRÊN NHÃN

-  Không sử dụng các sản phẩm đóng gói bị rách nát, hư hỏng.
-  Giữ sản phẩm ở những nơi mát và khô
-  Không để sản phẩm tiếp xúc ánh sáng mặt trời.
-  Sản phẩm này dùng một lần

TIO MEDİKAL TIBBİ ÜRÜN.
TURİZM İNŞ. SANAYİTİK LTD. ŞTİ.
5746/7 Sokak No:8 35090 Çamdibi - İZMİR
Tel:0.232.484 33 11 Faks:0.232.484 33 22
Ege V.D.844 040 9360