

Máy xét nghiệm đông máu cầm tay XPRECIA STRIDE

1/ Tính năng kỹ thuật:

- Máy xét nghiệm đông máu cầm tay Xprecia Stride xét nghiệm chỉ số PT/INR tại POC cho kết quả nhanh chóng, chính xác tương đương với phòng xét nghiệm trung tâm
- Kích thước máy: chiều sâu 40mm, cao 170mm, rộng 70mm, cân nặng khi có pin 300g
- Tuổi thọ máy: tối thiểu 14.000 test từ ngày sản xuất
- Dãy đo báo cáo: 0,8 – 8,0 INR
- Mẫu máu mao mạch toàn phần 6 µl
- Khả năng lưu trữ ít nhất 640 kết quả bệnh nhân, 300 kết quả kiểm chuẩn bằng hóa chất và 300 thông báo bị lỗi.

2/ Chỉ định:

- Máy Xprecia Stride được sử dụng cùng với thuốc thử PT/INR Strips để test chỉ số INR được chỉ định cho những bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc kháng đông đường uống wafarin với các bệnh như: khuyết tật tim bẩm sinh, chứng rung nhĩ, hẹp van tim 2 lá, thay van tim nhân tạo, huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi, máu đông trong động mạch có thể dẫn đến đau tim hay đột quỵ.

3/ Hướng dẫn sử dụng:

- Quy trình sử dụng đơn giản: có màn hình cảm ứng, hiển thị từng bước hướng dẫn sử dụng.