

Hướng dẫn sử dụng

**TRUGLYDE™**

**CHỈ PHẪU THUẬT TỰ TIÊU U.S.P (TỔNG HỢP)**

**Sợi Bện Polyglycolic Acid**

**MÔ TẢ:**

TRUGLYDE™ là chỉ phẫu thuật tổng hợp tự tiêu vô trùng,, gồm các homopolyme của Glycolide (100%). Truglyde có màu tím thuốc nhuộm D & C Tím số 2, phù hợp tiêu chuẩn của Mỹ. Truglyde không có sẵn màu tự nhiên . Truglyde được phủ bằng polycaprolactone và stearate canxi. Truglyde đáp ứng tất cả các yêu cầu của USP về chỉ phẫu thuật tổng hợp tự tiêu.

**CHỈ ĐỊNH:**

TRUGLYDE™ được chỉ định trong các mô mềm, bao gồm cả việc sử dụng trong các thủ tục về tạo hình và mắt, nhưng không dùng cho các mô tim mạch và thần kinh.

**HOẠT ĐỘNG:**

được hấp thu ở nơi được khâu, do quá trình thủy phân, khi polymer làm giảm acid Glycolic và acid lac. Nó được hấp thụ và chuyển hóa chậm trong cơ thể. Hấp thụ bắt đầu với sự mất sức bền kéo theo sau là mất khối lượng. Sau 14 ngày độ bền ban đầu còn lại 80%. Sau 4 tuần giảm 90% khả năng giữ vết thương, được hấp thu 75% sau 2 tháng và hấp thu hoàn toàn từ 75 đến 90 ngày.

**CHỐNG CHỈ ĐỊNH:**

là chỉ tự tiêu nên không sử dụng để khâu ở những vùng mô cần thời gian kéo dài để làm lành.

**CẢNH BÁO:**

- Không tái tiết trùng, Không sử dụng chỉ đã mở bao bì trước đó.
- Tiếp xúc kéo dài với dung dịch muối(như trong đường tiêu và mật) có thể dẫn đến sự hình thành sỏi.
- Nhiễm trùng vết thương có thể xảy ra vì sự hiện diện của chỉ khâu(vì đây là chất liệu từ bên ngoài cơ thể).
- Việc sử dụng khâu của Trusynth có thể không phù hợp ở những bệnh nhân bị các chứng bệnh có thể làm chậm quá trình lành vết thương.

**THẬN TRỌNG:**

Cũng như các chỉ phẫu thuật tự tiêu khác khi được dùng đóng những vết thương có diện rộng, cần lực kéo mạnh hoặc có độ phòng vết thương Bác sỹ phẫu thuật nên cân nhắc dùng thêm sự hỗ trợ từ chỉ không tiêu, Trong một số thủ thuật chỉnh hình phẫu thuật viên cũng nên cân nhắc khi dùng hỗ trợ bên ngoài, Chỉ khâu da, giữ nguyên tại chỗ hơn 7 ngày có thể gây kích ứng cục bộ và cần được cắt bỏ hoặc lấy đi

**PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC:**

Tác dụng ngoại ý liên quan đến việc sử dụng Truglyde bao gồm đáp ứng dị ứng ở một số bệnh nhân, kích ứng cục bộ thoáng qua tại chỗ vết thương, đỏ da trong quá trình hấp thu các vết khâu dưới da.

**CUNG CẤP:**

TRUGLYDE™ Theo U.S.P. Kích cỡ, từ 5-0 đến 2 (Theo Metric từ 1 đến 5). Chỉ khâu được cung cấp vô trùng với chiều dài cắt trước, không kim và gắn với các loại kim, hình dạng và chiều dài kim khác nhau, đóng gói 12 hoặc 36 tép mỗi hộp như được chỉ ra trên nhãn hộp.

**LƯU TRỮ:**

Các điều kiện bảo quản đề nghị: Dưới độ ẩm 30oC và nhiệt trực tiếp Không sử dụng sau khi hết hạn.Không sử dụng lại.