

Hướng dẫn sử dụng

TRULENE™

CHỈ PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU U.S.P (ĐƠN SỢI POLYPROPYLENE)

MÔ TẢ:

TRULENE™ là chỉ phẫu thuật không tiêu, vô trùng, bao gồm Polypropylene, sợi Polyolefin tổng hợp. Công thức phân tử là $(C_3H_6)_n$. Trulene có màu xanh dương với màu vàng đồng Phthalocyanine, chỉ số màu số 74160, thuốc nhuộm được U.F.A. chấp thuận. Trulene là chỉ đơn sợi và không có chất bao phủ. Trulene đáp ứng tất cả các yêu cầu theo tiêu chuẩn USP về chỉ phẫu thuật không tiêu.

CHỈ ĐỊNH:

TRULENE™ được chỉ định để sử dụng trong các mô mềm, bao gồm cả việc sử dụng trong các mô tim mạch, mắt và thần kinh.

CÁCH DÙNG:

TRULENE™ là chỉ khâu đơn sợi thao tác dễ dàng và dễ sử dụng. Nó không có các khoản trống trong cấu trúc của chỉ. Theo dõi vết thương thấy ít gây phản ứng mô và không gây nhiễm trùng vết thương. Trulene là chỉ không tiêu, không bị suy yếu lực do các phản ứng enzym hóa.

Trulene có tính trơn nên được đề nghị dùng ở vùng đòi hỏi ít gây phản ứng mô, Trulene còn được dùng rất hiệu quả trong khâu tăng cường những vết khâu đã bị nhiễm trùng hoặc bung chỉ.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

Chưa biết.

CẢNH BÁO:

- Không tái sử dụng. Không sử dụng chỉ đã bị mở bao bì. Sự tiếp xúc kéo dài của chỉ khâu này hoặc bất kỳ chỉ khâu nào khác bằng dung dịch muối, ví dụ như những chất có trong dạ dày và mật, có thể dẫn đến sự hình thành sỏi. Người sử dụng chỉ khâu phải quen với tiến trình và kỹ thuật phẫu thuật trước khi sử dụng chỉ khâu Trulene cho việc đóng vết thương vì nguy cơ tách vết thương có thể khác nhau tùy theo vị trí khâu và chất liệu chỉ khâu.
- Như bất kỳ vật liệu nào trong trường hợp nhiễm khuẩn có thể làm tăng khả năng lây nhiễm của vi khuẩn, phải thực hiện phẫu thuật phù hợp đối với việc thoát nước và đóng các vết thương bị nhiễm hoặc nhiễm bẩn.

THẬN TRỌNG:

- Cũng như tất cả các chỉ khâu khác khi xử lý cần cẩn thận để tránh bị nghiền nát hoặc làm hỏng bởi các dụng cụ phẫu thuật như kẹp hoặc thiết bị khác. Giống như bất kỳ vật liệu khâu nào, Người sử dụng chỉ khâu phải quen với tiến trình và kỹ thuật phẫu thuật trước khi sử dụng chỉ khâu Trulene cho việc đóng vết thương vì nguy cơ tách vết thương có thể khác nhau tùy theo vị trí khâu và chất liệu chỉ khâu.

Trulene đặc biệt phù hợp trong khâu tăng cường.

PHẢN ỨNG TRÁI NGƯỢC:

Tác dụng ngoại ý liên quan đến việc sử dụng Trulene bao gồm phản ứng mô viêm ban đầu tối thiểu và kích ứng cục bộ thoáng qua tại chỗ vết thương, sự hình thành calculi trong đường tiểu và mật khi tiếp xúc kéo dài với dung dịch muối như nước tiểu và dịch mật vv Giống như tất cả các vật liệu bên ngoài, Trulene Có thể làm tăng chứng nhiễm trùng hiện có.

CUNG CẤP:

TRULENE™ hiện có Kích cỡ theo U.S.P, từ 8-0 đến 1 (Theo Metric từ 0.4 đến 4). Chỉ khâu được cung cấp vô trùng, gắn với các loại kim khác nhau, hình dạng và chiều dài, đóng gói 12 hoặc 36 tệp mỗi hộp như được chỉ ra trên nhãn hộp.

LƯU TRỮ:

Các điều kiện lưu trữ được đề nghị: Dưới 30 " C tránh xa hơi ẩm và nhiệt trực tiếp Không sử dụng sau khi hết hạn.