

Hướng dẫn sử dụng

TRUPACE™

DÂY TẠO NHỊP TIM TẠM THỜI

MÔ TẢ

TRUPACE (Dây tạo nhịp tim tạm thời) là chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu vô trùng bao gồm dây thép không gỉ được bện 32 SWG, mác 316 LVM tuân thủ theo yêu cầu về thép cấy ghép y học.

Dây dẫn bao gồm một điện cực dây đa sợi không cách điện và dây dẫn đa sợi cách điện có lớp vỏ bọc trắng bằng nylon (polyamide 6) gắn với một kim gãy khúc thẳng. Đầu xa không cách điện được gắn vào một kim cong. Đầu xa không cách điện của dây nối được phân biệt rõ với phần thân dây phủ PTFE xanh da trời / xanh lá cây / cam.

Dây tạo nhịp tim tạm thời được sử dụng trong thời gian ngắn, thông thường với máy tạo nhịp tim bên ngoài. Dây dẫn tạm thời không có một cơ chế cố định, cho phép dễ dàng loại bỏ khi không còn cần thiết.

TRUPACE (Dây tạo nhịp tim tạm thời) được đóng gói trong bao polyester Tyvek tráng sơn/ tráng Poly

CHỈ ĐỊNH:

TRUPACE được chỉ định để sử dụng trong chẩn đoán nhịp tim tạm thời hoặc quy trình theo dõi sau phẫu thuật mở tim và được sử dụng kết hợp với máy điều hòa nhịp tim.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Khi cần theo dõi hoặc tạo nhịp tim vĩnh viễn, chống chỉ định dùng dây tạo nhịp tim tạm thời

THỰC HIỆN:

Dây tạo nhịp tim tạm thời gây ra phản ứng viêm cấp tính rất nhỏ trong mô; Dây tạo nhịp tim tạm thời không tiêu được, cũng không có bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về tính liên tục hoặc kháng xảy ra trong cơ thể

PHƯƠNG PHÁP ĐẶT

1. Sử dụng kim cong, đầu xa của dây tạo nhịp được gắn vào cơ tim như chỉ định bởi các trường hợp phẫu thuật và sự ưa thích của người điều hành. Phải chú ý cẩn thận để giảm thiểu nguy cơ chấn thương khi tháo bỏ dây.
2. Kim thẳng được đưa qua thành ngực và bị bẻ tại điểm đánh dấu bằng tay bằng cách đảo kim ở điểm số với kẹp giữ kim.
3. Đầu gần của dây nối đã sẵn sàng để kết nối với bộ phận tạo nhịp tạm thời hoặc bộ phận theo dõi theo hướng dẫn của nhà sản xuất

PHƯƠNG PHÁP THÁO

Thông thường, chỉ cần kéo dây tạo nhịp ra. Nếu không thể làm được, làm sạch khu vực da nơi dây được kéo ra, kéo dây dây và bấm hai ngón tay quanh da và dây và cắt. Phần đầu dây sau đó rút lại dưới da

THÂN TRONG/ CẢNH BÁO:

Cần phải kiểm tra tính liên tục và kháng của dây trước khi sử dụng. Người sử dụng nên làm quen với các thủ thuật phẫu thuật và kỹ thuật liên quan đến dây tạo nhịp tim tạm thời. Dây tạo nhịp tim tạm thời không được đặt theo đường cong vì điều này có thể phá vỡ lớp cách điện. Nên dùng X-quang để đánh giá việc đặt dây

Người sử dụng nên thận trọng khi cầm kim phẫu thuật để tránh bị thương do không cẩn thận. Trong việc xử lý dây tạo nhịp tim tạm thời, phải cẩn thận để tránh thiệt hại từ xử lý. Tránh bị tổn thương do sức ép hoặc uốn khi sử dụng các dụng cụ phẫu thuật như kẹp hoặc vật đựng kim.

PHẢN ỨNG PHỤ:

Các phản ứng phụ có liên quan đến việc sử dụng thiết bị này bao gồm: phản ứng mô bị viêm ban đầu rất nhỏ và kích ứng cục bộ tạm thời ở vùng bị thương. Cũng giống các vật lạ, dây tạo nhịp tim tạm thời cũng có nguy cơ gây nhiễm trùng tại chỗ nếu gắn vào vị trí không đúng dẫn đến không thể tạo nhịp và đau đớn.

VÔ TRÙNG:

Dây tạo nhịp tim tạm thời được khử trùng bằng Ethylene oxide. Không khử trùng lại. Loại bỏ các chỉ khâu đã bị mở, không sử dụng.

Không sử dụng nếu gói hàng bị hư hỏng. Sử dụng thiết bị không vô trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng và các vấn đề liên quan đến tính vô trùng.

Chỉ sử dụng một lần duy nhất. "Khi kim thẳng bị gãy ở điểm đánh dấu, sau khi đi qua thành ngực, không thể sử dụng lại sản phẩm."

BẢO QUẢN:

Điều kiện bảo quản được khuyến cáo: Dưới 30°C. Tránh xa nơi ẩm ướt và tỏa nhiệt trực tiếp. Nếu được bảo quản theo điều kiện trên đây, sản phẩm có thể sử dụng ổn định trong 5 năm kể từ ngày sản xuất. Không sử dụng sau khi hết hạn.

CÁC KÍ HIỆU TRÊN NHÃN



Không tái sử dụng



Không vượt quá 30°C



Số lô sản phẩm



Chú ý: Xem hướng dẫn sử dụng




Ngày sản xuất



Tránh nơi ẩm ướt



Ngày hết hạn

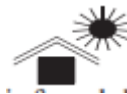

Tránh ánh nắng trực tiếp



Không sử dụng nếu hộp bị rách hỏng



Phương pháp vô trùng – Khí Etylen oxit



Sản xuất bởi:

SUTURES INDIA PVT. LTD

472 D, 13th Cross, 4th Phase,

Khu công nghiệp Peenya,

Bangalore – 560058, Ấn Độ

Email: sales@suturesin.com

Số Chăm sóc khách hàng (Tổng đài miễn phí) –

1800 102 5025



MED DEVICES LIFE SCIENCES LTD.

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland

Email: info@meddevices.net

Điện thoại: +353 766801106

F/PI/16 Rev: 02 – 01/07/2013