

Hướng dẫn sử dụng

TRUSILK™

CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU U.S.P

(Lựa đen được bệnh)

MÔ TẢ

TRUSILK™ là chỉ khâu phẫu thuật không tiêu được vô trùng, được làm từ protein hữu cơ, được gọi là fibroin. Protein này được bắt nguồn từ các loài Bombyx mori (B mori) đã được thuần hoá của họ Bombycidae. Tơ tằm tự nhiên có chứa khoảng 30% vật liệu ngoại lai hoặc kẹo cao su đã được loại bỏ bằng quy trình "Khử gôm" đặc biệt. Quá trình này là cần thiết đối với dây bện chặt trong khi đảm bảo rằng các sợi tơ giữ được tính tự nhiên và độ đàn hồi của chúng. Trusilk đáp ứng tất cả các yêu cầu, được thiết lập bởi Dược điển Hoa Kỳ đối với chỉ khâu phẫu thuật không tiêu.

CHỈ ĐỊNH:

TRUSILK™ được chỉ định để sử dụng trong các phần gàn mô mềm và/ hoặc thắt buộc bằng chỉ, bao gồm cả việc sử dụng trong các thủ thuật nhãn khoa nhưng không sử dụng trong mô tim mạch và thần kinh.

HOẠT ĐỘNG:

TRUSILK™ gây ra phản ứng viêm ban đầu ở mô mà dẫn đến sự khép kín dần của vết khâu bằng các mô liên kết dạng sợi. Trusilk không bị hấp thu, sự tan rã tăng dần của sợi lụa chứa protein trong ống nghiệm có thể làm giảm cường độ chịu kéo dần dần qua một khoảng thời gian.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Sử dụng chỉ khâu này không được chỉ định ở những bệnh nhân với nhạy cảm hoặc dị ứng với lụa. Do sự mất dần cường độ chịu kéo có thể xảy ra trong thời gian kéo dài trong ống nghiệm, không nên sử dụng khi cần duy trì vĩnh viễn cường độ chịu kéo như trong cố định các bộ phận giả cho mạch

CẢNH BÁO:

Không được tái khử trùng. Vứt bỏ chỉ khâu không sử dụng. Chỉ khâu này hay bất kỳ chỉ khâu nào khi tiếp xúc kéo dài với dung dịch muối, chẳng hạn như những chất có trong dải niệu hay mật, có thể dẫn đến hình thành sỏi. Người sử dụng nên làm quen với các thủ tục phẫu thuật và kỹ thuật liên quan đến chỉ tự tiêu trước khi sử dụng chỉ khâu Trusilk để khâu vết thương, vì nguy cơ rạn nứt vết thương có thể khác nhau với vị trí ứng dụng và vật liệu khâu được sử dụng. Do bất kỳ vật thể lạ nào có sự nhiễm bẩn vi khuẩn có thể làm tăng khả năng lây nhiễm của vi khuẩn, thực hiện phẫu thuật chấp nhận được phải thận trọng đối với dẫn lưu và khâu các vết thương bị nhiễm trùng hoặc bị bẩn.

THẬN TRỌNG:

Trong việc xử lý chỉ khâu này hoặc bất kỳ vật liệu khâu nào khác, cần cẩn thận để tránh tổn thương khi xử lý. Tránh tổn thương bởi sức ép hoặc sức uốn do sử dụng các dụng cụ phẫu thuật như kẹp hoặc giá đỡ kim. Với bất kỳ vật liệu khâu nào, sự đảm bảo an toàn vừa đủ của phần thắt nút đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật được chấp thuận với các nút buộc phẳng và vuông có phần cổ thừa được bảo đảm bởi các tình huống phẫu thuật và kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật.

PHẢN ỨNG PHỤ:

Các phản ứng phụ có liên quan đến việc sử dụng thiết bị, Trusilk bao gồm: nứt nẻ, mất dần dần cường độ chịu kéo qua thời gian, phản ứng dị ứng ở những bệnh nhân nhạy cảm với lụa, sự hình thành sỏi trong đường tiết niệu và óng mật khi tiếp xúc kéo dài với các dung dịch muối như nước tiểu và dịch mật làm tăng khả năng lây nhiễm của vi khuẩn, phản ứng viêm mô cấp tính, đau, phù nề và ban đỏ ở vết thương

CUNG CẤP:

TRUSILK™ hiện có kích cỡ U.S.P, 6-0 qua 2 (1 mét đến 5 mét). Chỉ khâu được cung cấp vô trùng với chiều dài cắt trước, cả loại không có kim và gắn với nhiều loại kim, có nhiều hình dạng và chiều dài và cũng trong các cuộn không vô trùng. 12 - 36 gói hàng được đóng gói trong một hộp in. Các cuộn không vô trùng được đóng gói cho mỗi 25 mét, 6 cuộn trong một hộp.

BẢO QUẢN:

Điều kiện bảo quản được khuyến cáo: Dưới 30°C. Tránh xa nơi ẩm ướt và tỏa nhiệt trực tiếp. Không sử dụng sau khi hết hạn.

CÁC KÍ HIỆU TRÊN NHÃN



Không tái sử dụng



Số lô sản phẩm



Ngày sản xuất



Ngày hết hạn



Không sử dụng nếu hộp bị rách hỏng



Phương pháp vô trùng – Khí Etylen oxit



Sản xuất bởi:

SUTURES INDIA PVT. LTD

472 D, 13th Cross, 4th Phase,

Khu công nghiệp Peenya,

Bangalore – 560058, Ấn Độ

Email: sales@suturesin.com

Số Chăm sóc khách hàng (Tổng đài miễn phí) –

1800 102 5025




Không vượt quá 30°C



Chú ý: Xem hướng dẫn sử dụng



Tránh nơi ẩm ướt

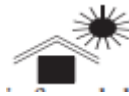

Tránh ánh nắng trực tiếp



MED DEVICES LIFE SCIENCES LTD.

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland

Email: info@meddevices.net

Điện thoại: +353 766801106

F/PI/05 Rev: 02 – 01/07/2013