

Hướng dẫn sử dụng

TRUSTEEL™

CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT KHÔNG TIÊU U.S.P

Chỉ khâu luôn kim phẫu thuật được vô trùng

Dây thép không gỉ 316 LVM sợi đơn

MÔ TẢ

Trusteel là chỉ khâu phẫu thuật không tiêu được vô trùng, được làm từ dây thép không gỉ 316 LVM. Trusteel tuân theo tất cả các yêu cầu, được thiết lập bởi Dược điển Châu Âu đối với chỉ khâu phẫu thuật bằng thép không gỉ sợi đơn và Dược điển Hoa Kỳ đối với chỉ khâu phẫu thuật không tiêu.

CHỈ ĐỊNH:

Trusteel được chỉ định để sử dụng trong khâu vết thương ở bụng, các thủ thuật chỉnh hình bao gồm phương pháp buộc vòng và điều trị gân và đóng xương ức.

HOẠT ĐỘNG:

Trusteel gây ra phản ứng viêm rất nhỏ ở mô và không bị hấp thu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Sử dụng chỉ khâu này không được chỉ định ở những bệnh nhân với nhạy cảm hoặc dị ứng với dây thép không gỉ, các phần tử của nó, crom, niken,...

CẢNH BÁO:

Người sử dụng nên làm quen với các thủ tục phẫu thuật và kỹ thuật liên quan đến chỉ tự tiêu trước khi sử dụng chỉ khâu phẫu thuật làm bằng thép không gỉ để khâu vết thương, vì nguy cơ rạn nứt vết thương có thể khác nhau với vị trí ứng dụng và vật liệu khâu được sử dụng. Thực hiện phẫu thuật chấp nhận được phải thận trọng đối với dẫn lưu và khâu các vết thương bị nhiễm trùng hoặc bị bẩn.

THÂN TRONG:

Trong việc xử lý chỉ khâu này hoặc bất kỳ vật liệu khâu nào khác, cần cẩn thận để tránh tổn thương khi xử lý.

PHẢN ỨNG PHỤ:

Các phản ứng phụ có liên quan đến việc sử dụng thiết bị, Trusilk bao gồm: nút nẻ, phản ứng dị ứng ở những bệnh nhân nhạy cảm với thép không gỉ LVM 316 và các phần tử của nó như crom và niken, phản ứng viêm mô cấp tính và kích ứng cục bộ tạm thời.

CUNG CẤP:

TRUSILK™ hiện có kích cỡ U.S.P, 1-7 (kích thước theo mét 4 đến 9). Chỉ khâu được cung cấp vô trùng gắn với nhiều loại kim và được đóng gói theo 1 tá mỗi thùng

THÂN TRONG:

Các quy định quốc gia hoặc địa phương có thể hạn chế bán, phân phối và sử dụng thiết bị này theo đơn của bác sĩ, bác sĩ thú y hoặc các bác sỹ được cấp phép khác

VÔ TRÙNG

Chỉ khâu Trusteel được khử trùng bằng Ethylene Oxide (ETO) như được chỉ định trên bao bì. Không được khử trùng; Vứt bỏ chỉ khâu đã mở, không sử dụng.

"Không đảm bảo được tính vô trùng nếu thử tái sử dụng bao bì sau khi khử trùng lại"

Không sử dụng nếu gói hàng bị hỏng hoặc mở. Sử dụng thiết bị không được vô trùng có thể dẫn đến nhiễm trùng và các vấn đề liên quan đến vô trùng

BẢO QUẢN:

Điều kiện bảo quản được khuyến cáo: Dưới 30°C. Tránh xa nơi ẩm ướt và tỏa nhiệt trực tiếp. Khi được bảo quản với điều kiện trên, sản phẩm sử dụng ổn định trong 5 năm từ ngày sản xuất. Không sử dụng sau khi hết hạn.

CÁC KÍ HIỆU TRÊN NHÃN



Không tái sử dụng



Không vượt quá 30°C



Số lô sản phẩm



Chú ý: Xem hướng dẫn sử dụng




Ngày sản xuất



Tránh nơi ẩm ướt



Ngày hết hạn

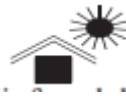

Tránh ánh nắng trực tiếp



Không sử dụng nếu hộp bị rách hỏng



Phương pháp vô trùng – Khí Etylen oxit



Sản xuất bởi:

SUTURES INDIA PVT. LTD

472 D, 13th Cross, 4th Phase,

Khu công nghiệp Peenya,

Bangalore – 560058, Ấn Độ

Email: sales@suturesin.com

Số Chăm sóc khách hàng (Tổng đài miễn phí) –

1800 102 5025



MED DEVICES LIFE SCIENCES LTD.

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland

Email: info@meddevices.net

Điện thoại: +353 766801106

F/PI/05 Rev: 02 – 01/07/2013