

Hướng dẫn sử dụng

TRUSYNTH™

CHỈ KHÂU PHẪU THUẬT TỰ TIÊU U.S.P (Tổng hợp)

(Được phủ Polyglactin 910)

MÔ TẢ

TRUSYNTH™ là chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu được vô trùng, được làm từ Polyglactin 910. Trusynth được nhuộm màu tím với màu tím D & C số 2, phù hợp với Bộ luật Hoa Kỳ về các quy định liên bang. Trusynth Fast cũng có loại không nhuộm. Để tăng độ bôi trơn và phẳng phiu, Trusynth Fast được phủ một lớp tổ hợp riêng biệt của Polyglycolide – co – lactide (30/70) và Calcium Stearate. Trusynth đáp ứng tất cả các yêu cầu, được lập bởi Dược điển Hoa Kỳ đối với chỉ khâu phẫu thuật tự tiêu (tổng hợp) ngoại trừ đường kính.

CHỈ ĐỊNH:

TRUSYNTH™ được chỉ định để sử dụng trong các phần gân mô mềm và/ hoặc thắt buộc bằng chỉ, bao gồm cả việc sử dụng trong các thủ thuật nhãn khoa nhưng không sử dụng trong mô tim mạch và thần kinh.

HOẠT ĐỘNG:

Chỉ khâu Trusynth bị hấp thụ vào vùng cấy ghép nhờ phương pháp thủy phân, khi mà chất trùng hợp bị phân hủy thành acid glycolic và axit lactic sau đó từ từ hấp thụ và chuyển hóa trong cơ thể. Việc hấp thụ bắt đầu bằng việc mất cường độ chịu kéo theo sự hao hụt khối lượng. 80% cường độ ban đầu vẫn được duy trì cho đến 14 ngày sau khi phẫu thuật. 90% cường độ chịu kéo ban đầu bị mất ở cuối tuần thứ 4 sau khi cấy ghép. Sự hấp thụ chỉ khâu Trusynth bị giảm xuống tối thiểu là 10% trong 2 tuần, 25% khối lượng bị hấp thụ trong 4 tuần, 75% trong 2 tháng và sự hấp thụ cơ bản hoàn thành sau 75 đến 90 ngày.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Chỉ tự tiêu Trusynth không nên sử dụng ở phần đòi hỏi giãn nở ở mô

CẢNH BÁO:

Không được tái khử trùng. Vứt bỏ chỉ khâu không sử dụng. Chỉ khâu này hay bất kỳ chỉ khâu nào khi tiếp xúc kéo dài với dung dịch muối, chẳng hạn như những chất có trong dải niệu hay mật, có thể dẫn đến hình thành sỏi. Loại chỉ tự tiêu này có thể đóng vai trò tạm thời như một vật thể lạ. Do bất kỳ vật thể lạ nào có sự nhiễm bẩn vi khuẩn có thể làm tăng khả năng lây nhiễm của vi khuẩn, thực hiện phẫu thuật chấp nhận được phải thận trọng đối với dẫn lưu và khâu các vết thương bị nhiễm trùng hoặc bị bẩn. Sử dụng chỉ khâu Trusynth có thể không phù hợp ở những bệnh nhân bị các chứng bệnh có thể làm chậm quá trình lành vết thương.

THÂN TRONG:

Vì Trusynth Fast là chỉ khâu tự tiêu, việc sử dụng chỉ không tiêu bổ sung có thể được xem xét khi phẫu thuật khi khâu vùng xử lý đang bị giãn, căng hoặc phồng lên hoặc vùng cần hỗ trợ thêm. Trong một số trường hợp, đặc biệt là thủ thuật chỉnh hình, sự cố định bằng sự hỗ trợ bên ngoài có thể được thực hiện theo ý của bác sĩ phẫu thuật. Chỉ khâu da tồn tại lâu hơn 7 ngày có thể gây kích ứng cục bộ và cần được cắt bỏ hoặc lấy ra theo chỉ định. Trong việc xử lý chỉ khâu Trusynth hoặc bất kỳ vật liệu khâu nào khác, cần cẩn thận để tránh tổn thương khi xử lý. Tránh tổn thương bởi sức ép hoặc sức uốn do sử dụng các dụng cụ phẫu thuật như kẹp hoặc giá đỡ kim. Với bất kỳ vật liệu khâu nào, sự đảm bảo an toàn vừa đủ của phần thắt nút đòi hỏi kỹ thuật phẫu thuật được chấp thuận với các nút buộc phẳng và vuông có phần cổ thừa được bảo đảm bởi các tình huống phẫu thuật và kinh nghiệm của bác sĩ phẫu thuật.

PHẢN ỨNG PHỤ:

Các phản ứng phụ có liên quan đến việc sử dụng Trusynth bao gồm: phản ứng dị ứng ở một số bệnh nhân, kích ứng cục bộ tạm thời tại vết thương, sau đó là phản ứng viêm tạm thời vừa phải với vật thể lạ, đỏ da và hóa cứng trong quá trình hấp thu các vết khâu dưới da.

CUNG CẤP:

TRUSYNTH™ hiện có kích cỡ U.S.P., 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 0,1 và 2 (1 mét đến 7 mét). Chỉ khâu được cung cấp vô trùng với chiều dài cắt trước, cả loại không có kim và gắn với nhiều loại kim, có nhiều hình dạng và chiều dài. 12 gói hàng được đóng gói trong một hộp in. 30 hộp như vậy được đóng gói trong thùng carton to.

BẢO QUẢN:

Điều kiện bảo quản được khuyến cáo: Dưới 30°C. Tránh xa nơi ẩm ướt và tỏa nhiệt trực tiếp. Không sử dụng sau khi hết hạn.

CÁC KÍ HIỆU TRÊN NHÃN



Không tái sử dụng



Số lô sản phẩm



Ngày sản xuất



Ngày hết hạn



Không sử dụng nếu hộp bị rách hỏng



Phương pháp vô trùng – Khí Etylen oxit



Sản xuất bởi:

SUTURES INDIA PVT. LTD

472 D, 13th Cross, 4th Phase,

Khu công nghiệp Peenya,

Bangalore – 560058, Ấn Độ

Email: sales@suturesin.com

Số Chăm sóc khách hàng (Tổng đài miễn phí) –

1800 102 5025




Không vượt quá 30°C



Chú ý: Xem hướng dẫn sử dụng



Tránh nơi ẩm ướt

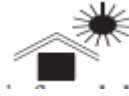

Tránh ánh nắng trực tiếp



MED DEVICES LIFE SCIENCES LTD.

The Black Church, St. Mary's Place, Dublin 7, Ireland

Email: info@meddevices.net

Điện thoại: +353 766801106

F/PI/05 Rev: 02 – 01/07/2013