




THE BD VACUTAINER® BLOOD COLLECTION SYSTEM Laboratory Solutions for Improved Patient Care, Enhanced Workflow and Healthcare Worker Safety

Hệ thống lấy máu chân không của BD

Giải pháp để cải thiện chất lượng chăm sóc bệnh nhân,
Nâng cao tiến độ công việc và sự an toàn cho nhân viên y tế

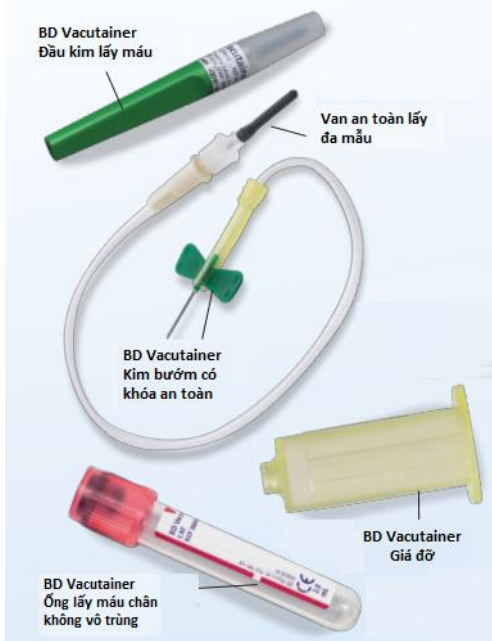

The BD Vacutainer® Blood Collection System enables blood to be directly collected from the vein of a patient into a tube that can be directly transported, centrifuged and placed directly on the analyzer. This simplified process reduces the potential for errors, improves specimen quality, makes the laboratory more efficient, creates a safer environment for the patient and the healthcare worker and improves employee satisfaction.

Hệ thống lấy máu chân không của BD cho phép lấy máu trực tiếp từ tĩnh mạch BN vào ống nghiệm do đó dễ dàng vận chuyển, ly tâm và đặt trực tiếp vào máy xét nghiệm. Quá trình đơn giản làm giảm thiểu sai sót, cải thiện chất lượng mẫu bệnh phẩm, tăng hiệu quả phòng xét nghiệm, tạo môi trường an toàn cho bệnh nhân lẫn nhân viên y tế đồng thời nâng cao sự hài lòng của nhân viên.

How BD Vacutainer® Blood Collection System Works?

Làm thế nào để lấy máu bằng hệ thống chân không của BD?

STEP 1 Bước Garo 10-15 cm phía trên vị trí lấy máu

STEP 2 Kiểm tra HSD. Xoay mở nắp kim màu trắng

STEP 3 Kết nối kim hai đầu vào giá đỡ

STEP 4 Xoay mở nắp đầu kim còn lại

STEP 5 Tiến hành lấy máu theo đúng quy trình. Quan sát máu chảy ra, đảm bảo kim đã vào đúng tĩnh mạch. Đưa ống lấy máu vào hệ thống. Tháo Garo ngay khi thấy máu bắt đầu chảy vào ống đầu tiên.

STEP 6 Lấy ống nghiệm ra khi máu ngưng chảy. Nếu cần lấy nhiều ống, lặp lại bước 5

STEP 7 Nếu dùng loại giá đỡ sử dụng một lần, hủy cả kim và giá đỡ vào bình hủy kim